

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Centro Endoscópico:</u> <u>Assistencial</u>	Versão: 01	Próxima revisão: 2016
Título Teste de Eficácia do Glutaraldeído			
Elaborado por: Aldanea Silvestrin; Kelly Cristine Alves Pavanati		Data da criação: 06/2014	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/08/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/08/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivo: Orientar procedimento de verificação da eficácia de glutaraldeído.			
Setor: CEN – Sala de limpeza e desinfecção		Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. O procedimento deve ser realizado todos os dias, antes e depois do início dos processos de limpeza dos aparelhos pelo profissional responsável pela Sala de Lavação naquele período. 2. Utilizar uma fita para cada cuba de glutaraldeído. Uma para a cuba de colonoscópios, uma para cuba de broncoscópios e outra para cada cuba de endoscópios. 3. Manter o frasco fechado após retirar as fitas do frasco. 4. Mergulhar a extremidade da fita, onde está localizado o quadrado reagente, dentro da solução e retirá-lo imediatamente, sem agitar ou balançar a fita. 5. Retirar o excesso de solução tocando a borda lateral longa da fita em uma toalha de papel. Não tocar o quadrado reagente no papel. 6. Repouse a fita em uma superfície plana e observe a coloração do quadrado reagente após 5 minutos. Não aguarde mais de 8 minutos, pois pode-se observar um falso resultado. 7. Qualquer tonalidade da cor AMARELA uniforme, indica que a solução é eficaz. Caso tenha PARTES BRANCAS, ou fique totalmente BRANCA, a solução deve ser desprezada. 			