

	COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	PÁGINAS 1 A 3
---	--	--	--------------------------

CÓDIGO 01	LIMPEZA/DESINFECÇÃO	2015.07
------------------	----------------------------	----------------

TÍTULO	ROTINA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BACIAS, JARROS, COMADRES, PAPAGAIOS E FRASCOS PARA COLETA DE DIURESE
---------------	--

	AUTORIA	REVISÃO	AUTORIZAÇÃO
Nome:	Enf ^o Gilson Bittencourt Vieira, Dr ^a Patrícia Vany, Enf ^a Taise Costa Ribeiro Klein	Dr ^a Ivete Masuwaka	
Cargo:	Médica e enfermeiros do SCIH	Médica- Chefe da CCIH	
Data:	19/01/2015		
Assinaturas:			

ROTINA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE BACIAS, COMADRES, JARROS, PAPAGAIOS E FRASCOS PARA COLETA DE DIURESE

Definição de Limpeza: Consiste na remoção da sujidade presente nos artigos, por meio da ação mecânica e conseqüente retirada da carga microbiana, garantindo a eficácia do processo de desinfecção ou esterilização.

Objetivo: Reduzir a carga microbiana natural dos artigos, retirar contaminantes orgânicos e inorgânicos para possibilitar a reutilização, protegendo usuários de infecções cruzadas de microorganismos patogênicos.

Abrangência: Unidades de assistência ao paciente.

Executor: Serventes de higienização e limpeza.

Equipamentos de Proteção: Luvas de borracha cor amarela e luvas de procedimentos.

Materiais Necessários: Água potável, esponja cor **amarela** e **azul**, detergente neutro, panos de algodão, frasco de Incidin®*, balde contendo ácido peracético a 1%.

Limpeza e desinfecção:

Bacias e Jarros:

- Lavar as mãos
- Calçar **luvas de procedimentos**
- Realizar esfregação com detergente neutro/líquido em toda superfície, utilizando a esponja de cor azul
- Enxaguar com água corrente
- Secar com pano limpo e seco (fornecido pelo serviço de processamento de roupas)
- Aplicar Incidin®*
- Embalar individualmente em sacos plásticos e guardar.
- Retirar as luvas e lavar as mãos

Comadres e papagaios

- Lavar as mãos
- Calçar **luvas** de borracha **amarela**
- Realizar esfregação com detergente neutro/líquido em toda superfície externa e interna quando possível, utilizando a esponja de cor amarela
- Enxaguar com água corrente

- Secar com pano limpo e seco (fornecido pelo serviço de processamento de roupas)
- Aplicar Incidin®*
- Embalar individualmente em sacos plásticos e guardar.
- Retirar as luvas e lavar as mãos

Frascos em material plástico ou de vidro para mensurar diurese

- Lavar as mãos
- Calçar **luvas** de borracha **amarela**
- Realizar esfregação com detergente líquido em toda superfície externa e interna quando possível, utilizando a esponja de cor amarelo
- Enxaguar com água corrente
- Imergir em ácido peracético 1 % por **30 minutos**
- Retirar os frascos exaguar em água corrente
- Secar com pano limpo e seco (fornecido pelo serviço de processamento de roupas)
- **Emballar individualmente em sacos plásticos e guardar.**

OBS: O ácido peracético deverá ser trocado a cada 5 dias, observando a validade.

* Incidin® - Solução de glucoprotamina. Validade do produto: 30 dias.

Referência:

ANVISA. **Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar.** Caderno C: Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.